

Противопролежневая подушка Invacare®

Введение

В настоящем руководстве по эксплуатации описано назначение Вашей подушки для сидения Invacare®. Просим Вас перед началом применения подушки внимательно ознакомиться с его содержанием.

Область применения / показания

Данная подушка для сидения снижает давления на туловище и стабилизирует сидячее положение пользователя. Поэтому она может применяться для профилактики пролежней, лечения пролежней со степенью тяжести, указанной в приведенной ниже таблице, а также для надлежащего позиционирования пациента. Благодаря многообразию вариантов исполнения противопролежневые подушки отвечают индивидуальным нуждам пациентов, занимающих при сидении различные положения.

Ограничение использования / противопоказания

Применение подушки для сидения Invacare® разрешается пациентам, вес которых не превышает значений, указанных в приведенной ниже в таблице. Нижняя граница веса обусловлена лишь жесткостью вспененного наполнителя **Flo-tech Contour Visco**. Подушки для сидения поставляются готовыми к использованию. Противопоказания к применению не известны.

В зависимости от типа и размера подушки для сидения Invacare® ее вес составляет от 900 г до 3 600 г.

Technische Daten	Flo-tech Kissen										
	Lite	Contour	Contour Lo Back	Image	Plus	Solution Xtra	Deep Solution	Contour Visco weich	Contour Visco mittel	Contour Visco fest	Propad Kissen Visco
Belastbarkeit / kg	125	152	152	140	152	140	152	25-50	50-75	75-100	110
Bis Dekubitusgrad	1	2	2	4	4	3	3	3	2	2	2
Kissenhöhe / cm	6.5	10	10-7.5	7.5	10	7.5	10	12	12	12	10
SB	ST										
30	36	X									
33	36	X									
36	36	X	X	X	X	X					
36	41	X	X	X	X	X	X				
38	41	X	X	X	X	X	X				X
38	43	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41	41	X	X	X	X	X	X				X
41	43	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41	46	X	X	X	X	X	X	X			X
43	41	X	X	X	X	X	X	X			X
43	43	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43	46	X	X	X	X	X	X	X			X
46	41	X	X	X	X	X	X	X			X
46	43	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46	46	X	X	X	X	X	X	X			X
48	43	X	X	X	X	X	X	X			
48	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
51	46						X				
53	46		X			X					
53	51		X			X					
58	46		X			X					
58	51		X			X					

Das Gewicht der Invacare® Sitzkissen variiert je nach Typ und Größe und zwischen 900 g und 3600 g.

Противопролежневая подушка Invacare®

Подушка состоит из следующих компонентов:

Внутренняя подушка изготовлена из вспененного материала, имеющего, в зависимости от модели, различную плотность и форму. Подушки **Flo-tech Plus**, **Image**, **Solution Xtra** и **Deep Solution** дополняются гелевыми подкладками, оптимизирующими распределение давления. Гелевые подкладки содержат чистый медицинский нетоксичный силикон.

Внешний чехол состоит из биэластичной ткани с внутренним защитным слоем, имеет нескользящую поверхность на нижней стороне и ручку на передней стороне подушки.

Сборка компонентов

Проверка размера подушки

Проверьте вместе с Вашим терапевтом или персоналом специализированного магазина, соответствуют ли размеры подушки размерам Вашей коляски или Вашего тела.

Ширина сидения: Подушка должна по ширине соответствовать ширине сидения Вашей коляски.

Глубина сидения: Подушка должна по длине соответствовать длине сидения Вашей коляски или быть больше ее на 2,5 см. При значительном превышении длиной подушки длины сидения мы рекомендуем вставить в чехол под внутренней подушкой стабилизирующую панель.

Укладка подушки во внешний чехол

- Снимите прозрачную упаковку.
- Полностью откройте застежку-молнию внешнего чехла.
- Вставьте подушку во внешний чехол.
- Закройте застежку-молнию внешнего чехла.
- Используйте подушку только с надетым внешним чехлом.

Ввод в эксплуатацию

Invacare® рекомендует провести первое применение подушки под контролем Вашего терапевта или персонала специализированного магазина.

- Положите подушку на сидение коляски.
- Сядьте на подушку и посидите на ней несколько минут, чтобы подушка адаптировалась к форме Вашего тела.
- Проконтролируйте регулировку опор для ног на Вашей коляске. Ваши ноги должны стоять на подножках, а бедра полностью лежать на подушке.

Применение: осмотр кожи на наличие покраснений

Регулярно, особенно, в первые дни применения подушки, проверяйте свою кожу на наличие покраснений. Если возникающие покраснения не исчезают в течение 15 минут, прекратите использовать подушку и проконсультируйтесь со своим терапевтом или персоналом специализированного магазина.

Применение в автомобилях

В настоящее время мы не располагаем результатами испытаний в отношении безопасного применения подушек Invacare® в автомобилях. Поэтому мы не рекомендуем использовать в автомобилях наши подушки для сидения.

Замена внешнего чехла

При нормальных условиях применения Invacare® рекомендует ежегодно заменять внешний чехол подушки. Запасные чехлы можно заказать отдельно.

Воспламеняемость

Не применяйте и не храните подушку вблизи открытого огня или источников сильного тепла.

Противопролежневая подушка Invacare®

Уход и чистка

Внимание! Не чистите подушку с применением горячего пара или высокого давления! Высокая температура и давление повредят подушку.

Чистка внутренней подушки

- Протрите внутреннюю подушку салфеткой, смоченной мягким чистящим средством. Сильные загрязнения можно вначале намочить, а затем удалить мягкой щеткой.
- Не используйте едкие или абразивные чистящие средства. Не применяйте при чистке острые предметы.
- Не окунайте внутреннюю подушку в воду или другие жидкости.
- Не стирайте внутреннюю подушку в стиральной машине.

Чистка внешнего чехла

Внешний чехол можно стирать в стиральной машине. Соблюдайте указания, приведенные на этикетке на внутренней стороне чехла.

Повторное применение / дезинфекция подушки

В случае загрязнения подушки выделениями организма пациента и перед передачей подушки другому пациенту ее необходимо продезинфицировать.

- Вычистите внутреннюю подушку и внешний чехол, как указано выше. При стирке внешнего чехла используйте бактерицидную добавку.
- Обработайте внешний чехол и внутреннюю подушку дезинфицирующим аэрозолем.

Гарантия

Срок гарантии на подушку для сидения Invacare® составляет в отношении дефектов материала и обработки два года. Отсчет данного срока начинается со дня отправки продукта. Гарантия действует при условии нормальной эксплуатации продукта. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные ненадлежащим применением, неправильной чисткой, плохим уходом или небрежностью при обращении с продуктом.

При предъявлении гарантийных требований решение о замене или ремонте продукта принимается Invacare®.

Гарантия не распространяется на внешний чехол. Компенсация ущерба ограничивается ремонтом или заменой подушки. Затраты на приобретение заменяющих продуктов не компенсируются.

Стандарты качества и невозгораемость

Обеспечение надлежащего качества является одной из основ деятельности нашего предприятия. Поэтому мы строго соблюдаем требования стандартов ISO 9001:2000 и ISO 13485:2003. Все продукты Invacare® имеют CE-маркировку согласно Директиве ЕС по медицинским продуктам.

Внутренняя подушка Invacare® **Flo-tech** прошла независимые испытания согласно норме BS5852:1990 с применением источников огня 0, 1 и 5 и получила соответствующий сертификат. Чехол прошел испытания согласно норме BS7175:1989 с применением источников огня 0, 1 и 5.

Изготовитель:

Invacare Operations UK Ltd
Unit 4, Pencoed Technology Center, Bridgend, CF35 5HZ, United Kingdom

Мы оставляем за собой право внесения изменений, служащих улучшению технических характеристик продукта, и не несем ответственности за возможные ошибки в содержании руководства по эксплуатации.

